


# SonicDICOM PACS Cloud

## ～アカウント及び PACS の作成手順～

1. <https://ja.sonicdicom.com/cloud/>にアクセスします。
2. [アカウント登録/ログイン]ボタンをクリックします。




3. [Sign Up]をクリックします。

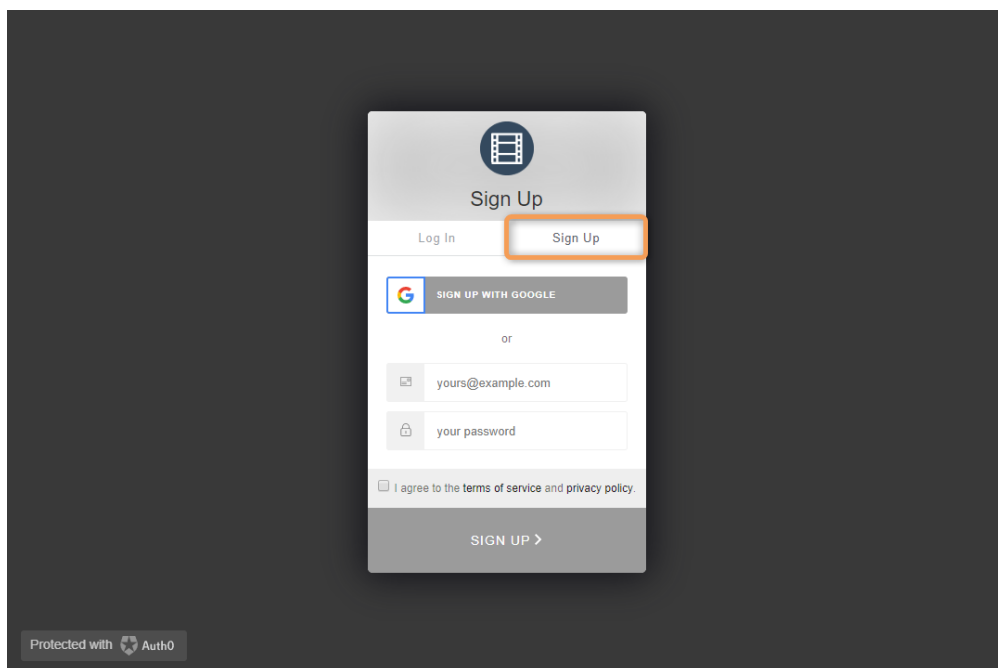

4. Google アカウントの有無で手順が異なります。それぞれの手順に従って、SonicDICOM アカウントを作成してください。

### Google アカウントをお持ちの場合

(1)利用規約を確認し、チェックボックスにチェックを入れ、[SIGN UP WITH GOOGLE]ボタンをクリックします。

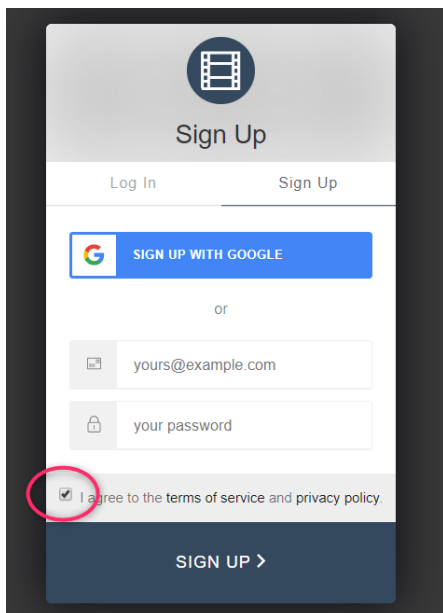

(2) Google アカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して、[次へ]ボタンをクリックします。



(3) Google アカウントのパスワードを入力し、[次へ]をクリックします。




(4) 手順書 p.5 の「5.プロフィールの入力」に進んでください。

### Google アカウントをお持ちでは無い場合


(1)メールアドレスと任意のパスワードを入力します。

パスワードは 8 文字以上且つ下記の条件のうち 3 つを満たす必要があります。


- ・ 英字の小文字 (a-z)
- ・ 英字の大文字 (A-Z)
- ・ 数字 (0-9)
- ・ 特殊文字 (!@#\$%^&\*)

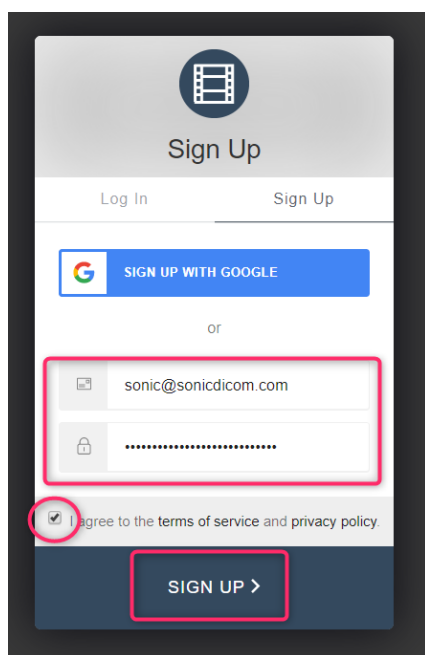

- (2) 利用規約を確認し、チェックボックスにチェックを入れ、[SIGN UP]をクリックします。  
入力したメールアドレス宛に確認メールが送信されます。
- (3) 届いたメール（タイトル：Welcome to SonicDICOM PACS Cloud）を開きます。
- (4) メール中部にある「Confirm my account」をクリックします。

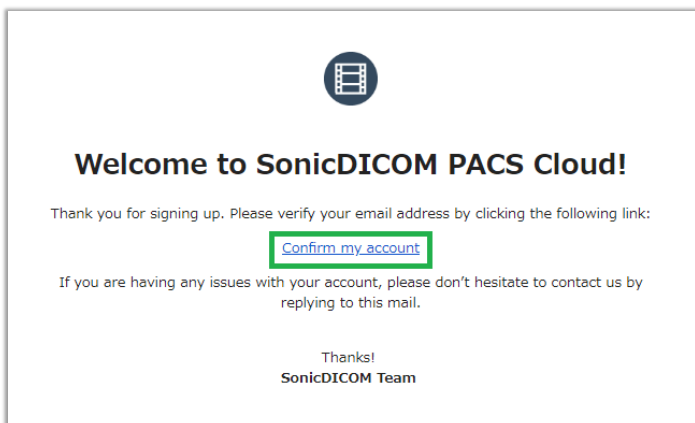

5. プロフィールを入力し、[Edit]ボタンをクリックします。

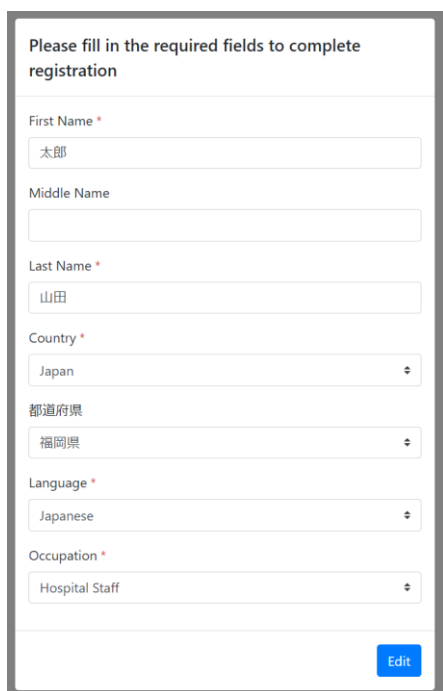

Please fill in the required fields to complete registration

First Name \*  
太郎

Middle Name  
[Empty]

Last Name \*  
山田

Country \*  
Japan

都道府県  
福岡県

Language \*  
Japanese

Occupation \*  
Hospital Staff

Edit

6. PACS の情報を入力し、最後に「追加」をクリックします。



PACSを作成

PACS

名前  
Jun PACS

リージョン  
アジアパシフィック (東京)

管理者設定

国  
Japan

タイムゾーン  
Asia/Tokyo

言語  
日本語

日付の形式  
yyyy-MM-dd

長さの単位  
mm

アカウント (既定値)

ID  
Jun

パスワード  
[Masked]

追加

**名前** : PACS を識別するための名前です。

**リージョン** : PACS を作成するリージョンを選択します。

**国** : 国を選択します。

**タイムゾーン** : 国によって選択出来るタイムゾーンが異なります。

**言語** : 使用する言語を選択します。

**日付の形式** : リスト等で表示する日付の形式を選択します。

**長さの単位** : 計測等で表示する長さの単位を選択します。

**ID** : PACS へログインする際に使用する ID です。

ID は英数字で設定してください。記号は使用できません。


**パスワード** : PACS へログインする際に使用するパスワードです。

パスワードは 4 文字以上で設定してください。

※ここで設定した ID、パスワードは PACS にログインする際に使用します。忘れると PACS にログイン出来ませんので、ご注意ください。

7. コンソール画面に作成した PACS が表示されます。

「PACS にアクセスする」をクリックすると PACS のログイン画面が表示されます。

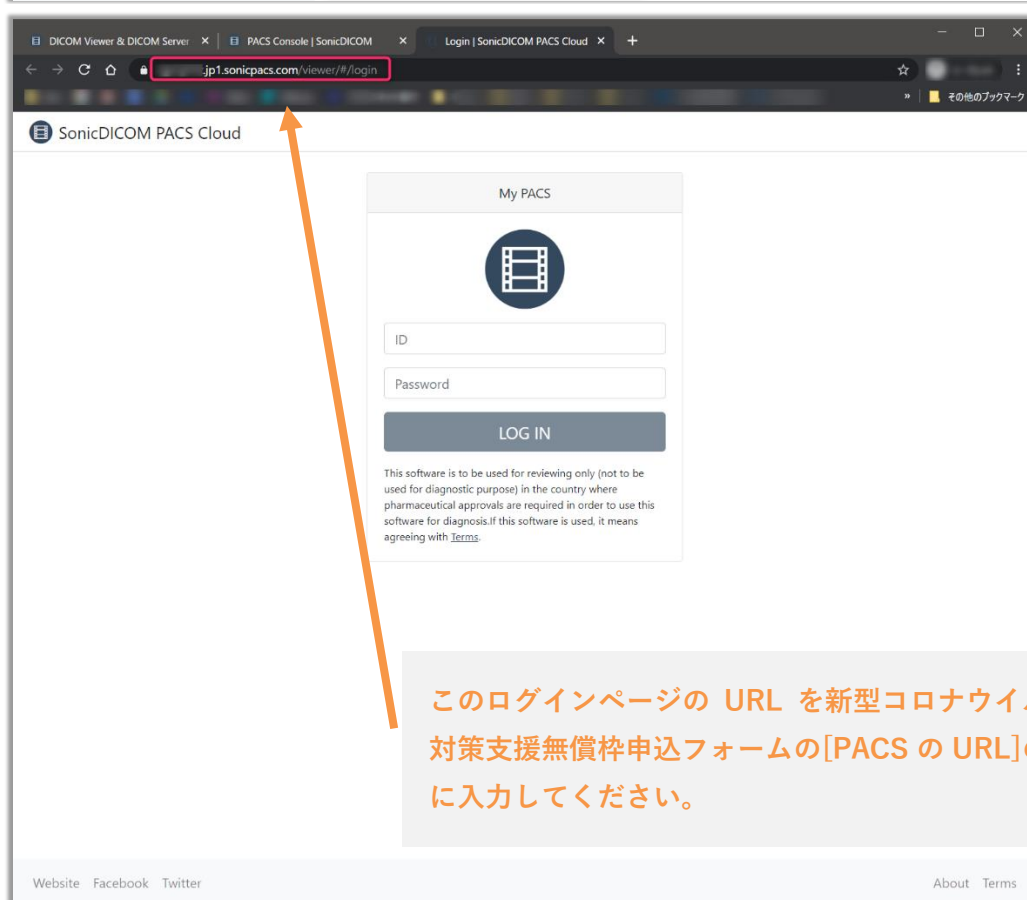

以上でアカウント及び PACS の作成は完了です。

**今回の無償枠（保存容量 100GB、Web 接続数 30）を適用するには**

新型コロナウイルス対策支援無償枠の申込フォーム (<https://ja.sonicdicom.com/cloud/covid-19/>) に必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。

ご不明点がございましたら、メールにてお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 [sonic@sonicdicom.com](mailto:sonic@sonicdicom.com)